

Rolyan® Polyflex II®



Características de manejo

- Estira fácilmente con una excelente capacidad de drapeado, conformando así a los contornos para proporcionar una férula transparente
- Manipulación mínima requerida; movimientos suaves y lisos logran resultados superiores
- Maneje en un plano y forme la férula horizontal en una posición de gravedad asistida
- Bordes se recortan y frotran suave fácilmente

Colocación

- Para una colocación temporal , pellizque las superficies calientes juntamente.
- Para una colocación permanente, retire el revestimiento con removedor líquido o raspando con el instrumento afilado.

Usos recomendados

- Ideal para pacientes con dolor o irritación.
- Bases dinámicas estabilizadoras de férulas de las articulaciones, requiriendo un manejo suave.
- Collares y máscaras.
- Aplicable sobre muñeca, mano y pulgar.



Descripciones

15 cm x 30 cm Beige

20 cm x 46 cm Beige

23 cm x 30 cm Azul

30 cm x 46 cm Beige

Medidas y Cantidades	Materiales	Color
2.4 mm x 46 cm x 61 cm (4 moldes por caja)	Sólido y 1% Perforado	Blanco y Ligero
1.6 mm x 30 cm x 46 cm (4 moldes por caja)	Sólido y 1% Perforado	Blanco
3.2 mm x 30cm x 46 cm (6 moldes por caja o un solo molde)	Sólido y 1% Perforado	Blanco
3.2 mm x 46 cm x 61 cm (4 moldes por caja o un solo molde)	Sólido y 1% Perforado	Beige/Blanco/ Azul/ Ligero
3.2 mm x 61 cm x 91 cm (2 moldes por caja o un solo molde)	Sólido y 1% Perforado	Beige/Blanco/ Azul

Temperatura	Tiempo
Caliéntese en el agua a una temperatura de entre 70 ° C a 75 ° C por 35 segundos (molde de 1.6 mm).	Permita un tiempo de rutina de 1 a 2 minutos (molde de 1.6 mm).
Caliéntese en el agua a una temperatura de entre 70 ° C a 75 ° C por 1 minuto (molde de 2.4 mm).	Permita un tiempo de rutina de 2 a 3 minutos (molde de 2.4 mm).
Caliéntese en el agua a una temperatura de entre 70 ° C a 75 ° C por 1 minuto (molde de 3.2 mm).	Permita un tiempo de rutina de 4 a 6 minutos (molde de 3.2 mm).

