

## Rolyan® Polyform®



### Características de manejo

- Se estira fácilmente con una excelente capacidad de drapeado, conformando así los contornos.
- Manipulación mínima requerida; movimientos suaves logran resultados superiores.
- Manéjese en un plano horizontal y forme la férula en una posición de gravedad asistida.
- Material de 1.6 mm se corta fácilmente al enfriarse.
- Bordes se recortan fácilmente. Libre de látex.

### Colocación

- Para una colocación temporal , pellizque las superficies calientes juntamente.
- Para una colocación, retire el revestimiento con removedor líquido o raspando con un instrumento afiliado.

### Usos recomendados

- Ideal para pacientes con dolor o irritación de las articulaciones, requiriéndose un manejo suave.
- Aplicable para mano, muñeca y dedo pulgar.





**Tipo de material: Sólido**

**Medidas de lado**

**3.2 mm color Blanco**

15 cm x 30 cm

15 cm x 46 cm

20 cm x 23 cm

23 cm x 30 cm

23 cm x 46 cm

30 cm x 46 cm

## Otras especificaciones

Medidas y Cantidades	Materiales	Color
1.6 mm x 30 cm x 46 cm ( 4 moldes por caja )	Sólido y 1% Perforado	Blanco
3.2 mm x 30 cm x 46 cm ( 6 moldes por caja )	Sólido y 1% Perforado	Blanco
3.2 mm x 46 cm x 61 cm ( 4 moldes por caja o un solo molde )	Sólido y 1% Perforado	Beige/ Blanco/ Azul
3.2 mm x 61 cm x 91 cm ( 2 moldes por caja o un solo molde)	Sólido y 1% Perforado	Beige/Blanco/ Azul

Temperatura	Tiempo
<p>Caliéntese en el agua a una temperatura de entre 65° C a 70 ° C por 30 segundos ( molde de 1.6 mm).</p> <p>Caliéntese en el agua a una temperatura de entre 65 ° C a 70 ° C por 1 minuto ( molde de 3.2 mm).</p>	<p>Permita un tiempo de rutina de 1 minuto (molde de 1.6 mm).</p> <p>Permita un tiempo de rutina de 3 a 5 minutos (molde de 3.2 mm).</p>